

Desinfektion der Luftpolsterschienen und PANat-Laptool Therapiegeräte

Grundsätzlich gilt die Empfehlung: Vor dem Gebrauch der nicht persönlichen Geräte die Hände mit Handalkohol desinfizieren oder mit Seife gut waschen. Dies bietet den grössten Schutz vor der Verbreitung von Keimen.

Wählen Sie ein Desinfektionsmittel, welches dem aktuellen Bedürfnis und dem landesüblichen Standard entspricht, z.B. ein zugelassenes Desinfektionsmittel zur Bekämpfung von Influenza und Coronaviren.

Desinfektion der Luftpolsterschienen

Die Reinigung erfolgt mit Desinfektionstüchern oder einem Desinfektionsspray.

Desinfektion der lackierten Holzflächen vom PANat-Laptool

Die Fläche mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch¹ gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden.

Desinfektion von Klettverschlussmaterial, Softgriffen und Zellkautschukbelag

Klettband, Softgriffe oder Zellkautschuk mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel² einsprühen und trocknen lassen. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden.

Reinigung der schwarzen Softgriffe

Sie können durch Lösen der Schrauben entfernt werden. Sie lassen sich von Hand putzen oder in der Spülmaschine waschen. Bei Patienten, die ihre gelähmte Hand vor dem Üben nicht waschen können, empfiehlt es sich, ein feines Kosmetik- oder Papiertaschentuch um den Griff zu legen.

Reinigung und waschen der Klettverschlüsse

Um ein verschmutztes Haken-Klettband von Fusseln oder Härchen zu befreien, genügt in der Regel ein Stück breites Klebband. Durch mehrmaliges aufdrücken können die Fusseln leicht vom Haken-Klettband entfernt werden. Bei stark verschmutztem Hakenband können Fusseln oder Haare mit einer kleinen Drahtbürste oder Nadel entfernt werden.

Bei verbogenen Haken kann es sein, dass das Haken-Klettband nicht mehr gut haftet. Fahren Sie mit einem Messer mehrere Male gegen den Strich der Haken. Dadurch werden sie wieder aufgerichtet.

Die Klettverschlüsse können im geschlossenen Zustand (Haken auf Flausch) bei 40° - 60° gewaschen werden.

Waschen der Faustfixationskappe aus Neopren

Maschinenwäsche: normales Programm bei 40°, nicht tumbeln, nur trocknen lassen.

1) Produktempfehlung: mikrofid® universal wipes von der Firma Schülke.

2) Produktempfehlung: Antifect®N liquid von der Firma Schülke